

POSITIONNEMENT DIRECT DES GAINES EN BOUCHE :

1. Choisissez les piliers d'attache **boule® BioOsteo®** selon la hauteur gingivale adéquate. Vissez-les à 25 N.cm dans les implants à l'aide du tournevis hexagonal 1.2mm et la clé dynamométrique BioOsteo® (pour **les implants Ø3mm** le couple de serrage est de **15N.cm**).
2. Insérez les gaines dans les capsules à l'aide de l'outil d'insertion des gaines.
3. Placez les disques de protection sur le pilier d'attache **boule® BioOsteo®**. Placez les capsules avec les gaines sur les attachements.
4. Vérifiez que la position en bouche de la prothèse soit correcte avant de la rebaser.
5. Remplissez les trous dans la prothèse avec de la résine et positionnez la prothèse dans la bouche du patient.
6. Retirez la prothèse et vérifiez que les attachements soient bien rebasés et stables.
7. Retirez les disques de protection avec une précelle.
8. Enlevez avec soin l'excès de résine.
9. Clipsez en bouche la prothèse terminée.

DESCRIPTION DES PARTIES MALES ET FEMELLES :



Noire Pour le montage en laboratoire

Jaune Très souple - 0.6 kgs

Rose Souple - 1.2 kgs

Transparente Standard - 1.8 kgs

Boitier métallique

Disc de protection



INSTRUMENTATION :

- Outils d'insertion des gaines
- Outils d'extraction des gaines



- Clé dynamométrique réglable + tournevis Hex. 1.2mm.



SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES :	
STERILE R	STERILISATION PAR IRRADIATION
	CONSERVER AU SEC
	ATTENTION, LIRE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS
LOT	CODE DU LOT
	CONSERVER A L'ABRIS DU SOLEIL ET DE LA LUMIERE
	NE PAS STERILISER
	NE PAS UTILISER SI EMBALLAGE ENDOMMAGE
	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE – NE PAS REUTILISER
	FABRICANT
	CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION
	DATE DE FABRICATION
	À UTILISER JUSQU'AU
REF	REFERENCE

S.A.R.L. Bio-Ostéo

Fabricant de système d'implantologie dentaire, vis d'ostéosynthèses et instruments de chirurgie.

Adresse : 38, Azur et Mer, 16103 Bordj Elbahri, Alger.


Tél. +213 5 49 21 22 92 - contact@bioosteo.net - Web : www.bioosteo.net

Agrément du ministère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière N° 03/17 du 15/02/2017

POSITIONNEMENT DIRECT EN BOUCHE :

1. Choisissez les piliers Equator® BioOsteo® selon la hauteur gingivale adéquate. Vissez-les dans les implants à 25 N.cm à l'aide de la clé dynamométrique BioOsteo® et le tournevis hexagonal 1.2mm.
2. Insérez la coiffe plastique de rétention dans le boîtier métallique à l'aide de l'outil d'insertion des coiffes de rétention.
3. Placez les disques de protection sur les piliers Equator® BioOsteo®.
4. Clipsez l'ensemble de (boîtier métallique + coiffe en plastique) sur les attachements.
5. Positionner la prothèse en bouche, repérer l'emplacement des piliers et évider (rebaser) l'intrados de la prothèse à l'aide d'une fraise boule.
6. Vérifiez que la position en bouche de la prothèse soit correcte et que le boîtier ne soit pas en collision avec la prothèse.
7. Remplissez les trous dans la prothèse avec de la résine puis positionnez la prothèse dans la bouche du patient.
8. Retirez la prothèse et vérifiez que les attachements soient bien rebasés et stables.
9. Retirez les disques de protection avec une précelle.
10. Enlevez avec soin l'excès de résine.
11. Clipsez en bouche la prothèse terminée.

DESCRIPTION DES PARTIES MALES ET FEMELLES :

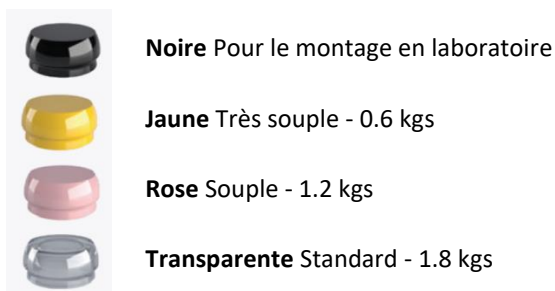

Disc de protection




Boîtier métallique

Boîtier métallique

Coiffe plastique

Pilier Equator®
BioOsteo®

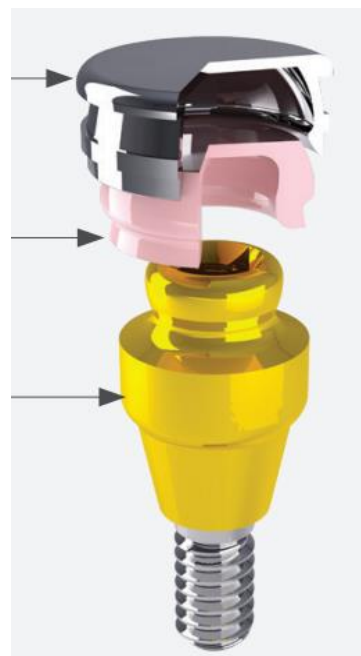

INSTRUMENTATION :

- Outils d'insertion des gaines
- Outils d'extraction des gaines



- Clé dynamométrique réglable + tournevis Hex. 1.2mm.



SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES :	
STERILE R	STERILISATION PAR IRRADIATION
	CONSERVER AU SEC
	ATTENTION, LIRE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS
LOT	CODE DU LOT
	CONSERVER A L'ABRIS DU SOLEIL ET DE LA LUMIERE
	NE PAS STERILISER
	NE PAS UTILISER SI EMBALLAGE ENDOMMAGE
	DISPOSITIF A USAGE UNIQUE – NE PAS REUTILISER
	FABRICANT
	CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION
	DATE DE FABRICATION
	À UTILISER JUSQU'AU
REF	REFERENCE

S.A.R.L. Bio-Ostéo

Fabricant de système d'implantologie dentaire, vis d'ostéosynthèses et instruments de chirurgie.

Adresse : 38, Azur et Mer, 16046 Bordj Elbahri, Alger.

Tél. +213 5 49 21 22 92 - contact@bioosteo.net - Web : www.bioosteo.net

Agrément du ministère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière N° 03/17 du 15/02/2017