



# Bioostéo

## PINS & MEMBRANES



BIO OSTEO - n°38, Azur et Mer, Alger Plage, Bordj Elbahri 16103 Alger- Algérie  
Tél. +213 549 212 292 Tél. +213 552 316 740 Fax. +213 23 949 320  
contact@bioosteo.net <http://www.bioosteo.net>  
<https://www.facebook.com/BioOosteo/>



## Caractéristiques & Avantages

Fixation parfaite des membranes : la fixation correcte des membranes empêche la dislocation du matériau et favorise la néoformation osseuse,

Biocompatibilité : les membranes sont fabriqués à partir d'un titane grade 2 origine Japan, les pins sont en alliage de titane origine USA,


Stérilisation: ancillaire permet le stockage et la stérilisation des pins et membranes,

Universel : les clous de fixation BioOsteo® peuvent être utilisés avec les membranes titane, membranes résorbables et non résorbables,

## Utilisation

Domaines thérapeutiques associés :

- Régénération Osseuse Guidée
- Augmentation Osseuse

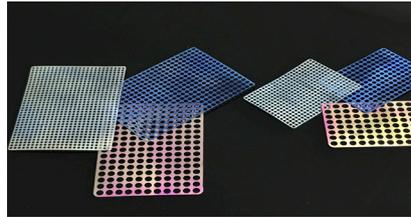

## Conseils d'application

Prélever les pins à l'aide de l'applicateur par encliquetage,  
 Fixer la membrane BioOsteo® avec les pins,  
 Désengager l'applicateur par un mouvement latéral ou en utilisant la lame de scalpel dans la rainure de guidage.


## Pins en titane grade 5 (origine USA)

CODE	DIAMETRE	LONGUEUR	PRIX
CL3-0,90	0.90	3mm	632 DA
CL5-0,90	0.90	5mm	632 DA



## Membranes en titane grade 2 (origine Japan)

Code	Epaisseur	Dimension	Ø trous
G01RUV-1	0.1mm	25x35mm	Anatomique 1 + 1.6 + 3
G012535-1			1.0mm
G012535-2			1.6mm
G012535-3			2.0mm
G012535-4	35x50mm	2.4mm	1.0mm
G013550-1			1.6mm
G013550-2			2.0mm
G013550-3			2.4mm

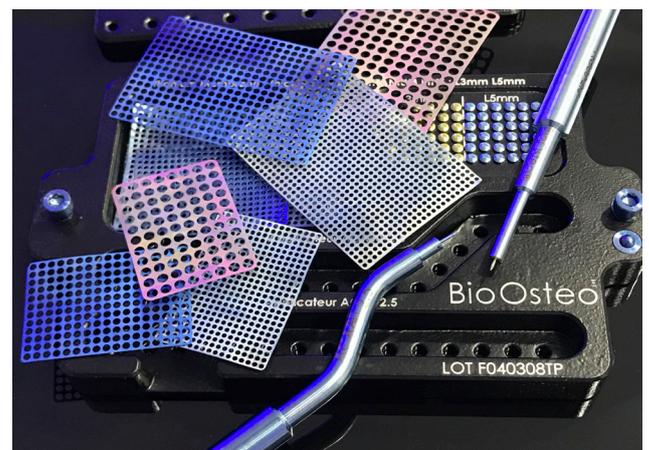

## Instruments

Code	Désignation
AC80-2,5	APPLUATEUR DE PINS DROIT
ACA80-2,5	APPLUATEUR DE PINS COUDE



### Composition du kit pins & membranes :

- 36 pins longueurs 3mm
- 36 pins longueurs 5mm
- Une membrane 0.1mm 25x35mm
- Une membrane 0.1mm 35x50mm
- Un applicateur de pins, droit
- Un applicateur de pins, coudé
- Le support de rangement et de stérilisation à 134°/18mn




### 3D Titanium Membrane BioOsteo pour G.B.R.

Possibilité d'utilisation des vis d'ostéosyntheses 1.6mm associés à des pins L3mm ou L5mm

Disponible pour tout type d'implants dentaires .




La vis de cicatrisation permet la stabilisation de l'implant qui devient solidairement fixe avec la membrane 3D.

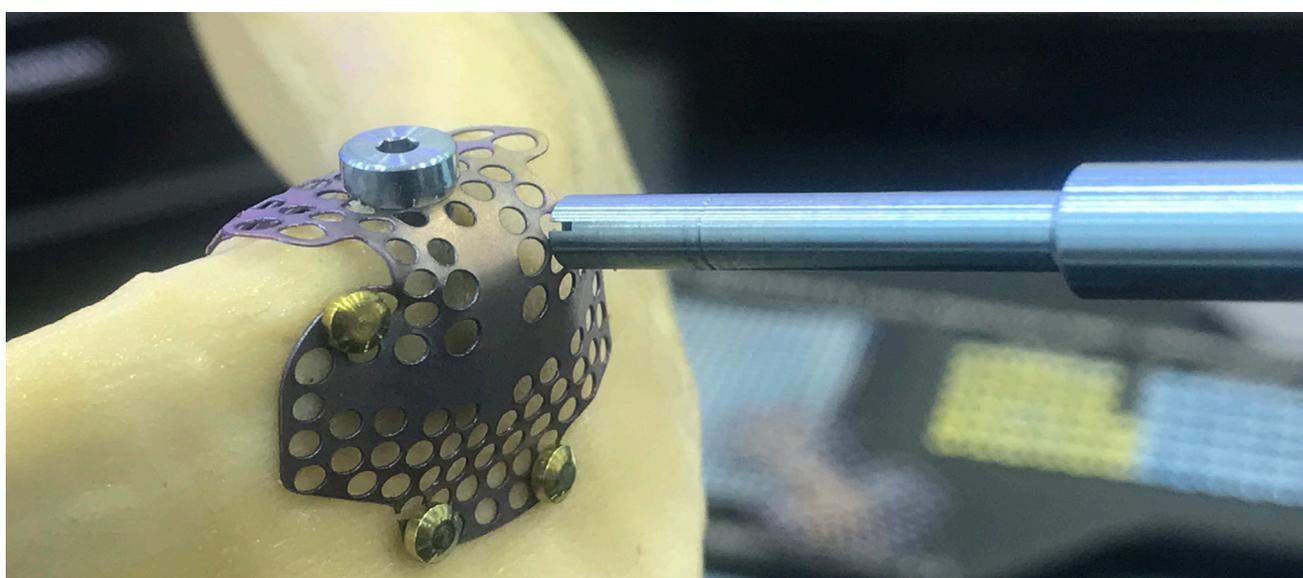


## BONE GRAFT SURGERY KIT



## ORTHODONTIC SURGICAL KIT

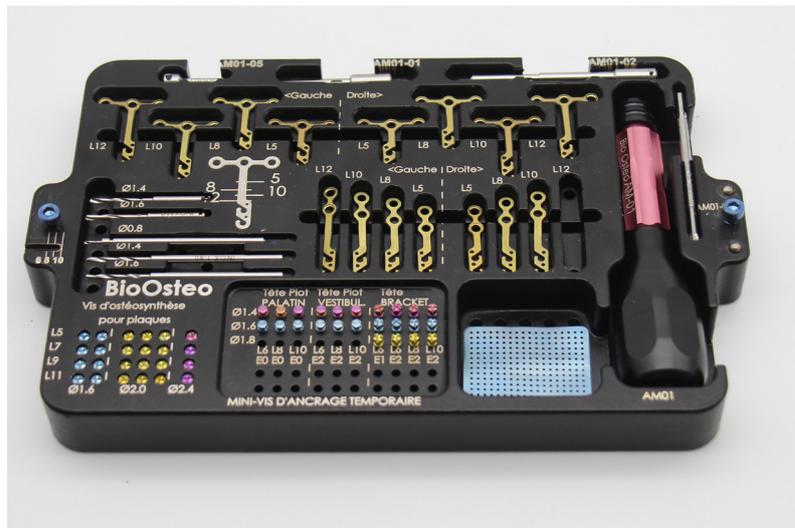

Membranes titane 0.025 , 0.04 , 0.06 et 0.1mm

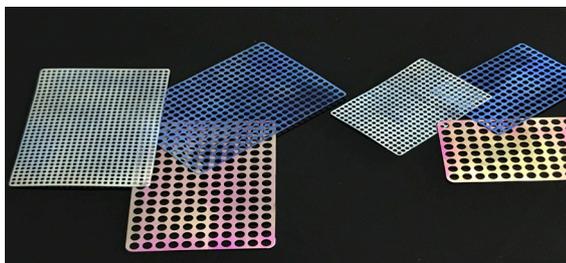

BIO OSTEOP - n°38, Azur et Mer, Alger Plage, Bordj Elbahri 16103 Alger- Algérie  
Tél. +213 549 212 292 Tél. +213 552 316 740 Fax. +213 23 949 320  
contact@bioosteo.net <http://www.bioosteo.net>

<https://www.facebook.com/BioOosteo/>