

ATTACHEMENT LOCATOR®:

A-Profil bas de la zone rétentive : la hauteur totale d'un pilier Locator (pilier + capsule) est la plus basse qui puisse exister.

1. **Facile utilisation pour le patient** : la forme des piliers Locator rend son utilisation très simple. Le patient peut facilement trouver les points d'accroche de la prothèse et il n'a pas besoin d'avoir un alignement parfait afin de l'ajuster-
2. **Rétention souple** : le système unique des piliers Locator et la capsule de nylon font que la prothèse peut tourner sur les piliers de manière contrôlée et sans perte de rétention. Cette élasticité apporte un grand confort au patient et elle permet d'ajuster les prothèses sur implants avec un écart allant jusqu'aux 10 degrés.
3. **Double rétention** : le système de rétention breveté par Locator permet à ces piliers une rétention plus élevée par surface que tout autre type d'ancrage.
4. **Différents degrés de rétention** : il existe plusieurs types de pièce de nylon avec de retentions différentes classées par des couleurs :
 - Noire : coiffe de labo
 - Rouge : 0.8 lbs soit 360g. (souple)
 - Bleu : 1.2 lbs, soit 540g. (standard)
 - Rose : 2.4 lbs, soit 1100g. (forte)



B- MODE OPERATOIRE TECHNIQUE DE POSITIONNEMENT DIRECT :

1. Choisissez les piliers LOCATOR® BioOsteo® selon la hauteur gingivale adéquate. Vissez-les dans les implants selon la recommandation de serrage de votre système d'implant à l'aide de la clé dynamométrique BioOsteo® et le tournevis hexagonal 1.2mm.
2. Insérez la coiffe plastique de rétention dans le boîtier métallique à l'aide de l'outil d'insertion des coiffes de rétention.
3. Placez les disques de protection sur les piliers LOCATOR® BioOsteo®.
4. Clipsez l'ensemble de (boîtier métallique + coiffe en plastique) sur les attachements.
5. Positionner la prothèse en bouche, repérer l'emplacement des piliers et éviter (rebaser) l'intrados de la prothèse à l'aide d'une fraise boule.
6. Vérifiez que la position en bouche de la prothèse soit correcte et que le boîtier ne soit pas en collision avec la prothèse.
7. Remplissez les trous dans la prothèse avec de la résine puis positionnez la prothèse dans la bouche du patient.
8. Retirez la prothèse et vérifiez que les attachements soient bien rebasés et stables.
9. Retirez les disques de protection avec une précelle.
10. Enlevez avec soin l'excès de résine.
11. Clipsez en bouche la prothèse terminée.

